

CEFAR COMPLEX REHAB 2 VOIES

Référence : 10026

Le Cefar Rehab 2 Voies est un stimulateur 2 voies antalgique et excitomoteur permettant un traitement efficace en courant NMES et TENS.

La fiabilité, la polyvalence et la facilité d'utilisation positionnent ce produit comme la référence des solutions pour la poursuite des séances de rééducation en électrothérapie à domicile.

Les points forts du Rehab 2 Voies

2 canaux.

27 programmes prédéfinis : antalgique et excito moteur.

3 programmes personnalisable.

3 types d'applications : TENS, NMES et guide pour injections musculaires.

5 modes : continu, intermittent, réciproque, modulé sur largeur d'impulsion et modulé en fréquence.



LES CARACTÉRISTIQUES DU CEFAR COMPLEX REHAB 2 VOIES

- Canaux : 2 sorties à réglage d'intensité indépendante.
- Fréquence : 1 à 120 Hz.
- Intensité : 0 à 100 mA par canal (2 réglages indépendants).
- 5 modes :
 - continu
 - intermittent
 - réciproque (agonistes/ antagonistes)
 - modulé sur largeur d'impulsion
 - modulé en fréquence
- Incrément d'intensité : 0,5 mA
- Largeur d'impulsion maxi : 400 µs secondes.
- Forme de courant : carrée biphasique symétrique 100% compensé.
- Alimentation : 2 piles 1.5 V.
- Écran rétro-illuminé
- Dimensions : 12 x 5 x 2,7 cm
- Poids 180 g
- Garantie : 2 ans (sauf batterie et autres accessoires).

CEFAR COMPLEX REHAB 2 VOIES

Référence : 10026

COMPOSITION DU SET CEFAR COMPLEX REHAB 2 VOIES



- 1 stimulateur Pro Rehab
- 1 chargeur rapide
- 1 batterie haute énergie
- 4 câbles Fil
- 1 adaptateur Snap-Fil
- 2 sachets d'électrodes carrés (5x5 cm 1 snap)
- 2 sachets d'électrodes rectangulaires (5x10 cm 2 snap)
- 1 stylet point moteur
- 1 clip ceinture
- 1 flacon de gel 250 ml
- 1 coque de protection
- 1 housse de transport
- 1 manuel d'utilisation et guide pratique sur CD/USB
- 1 guide de démarrage rapide et avertissements
- 1 guide de positionnement des électrodes

CEFAR COMPLEX REHAB 2 VOIES

Référence : 10026

FONCTIONS SPÉCIFIQUES DU CEFAR COMPLEX REHAB 2 VOIES

CEFAR EASY TOUCH™: RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE L'INTENSITÉ :

- Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour que l'intensité soit réglée et ajustée automatiquement en fonction des résultats de l'analyse Autotest. La fonction CEFAR EASY TOUCH™ facilite l'application du traitement et permet d'effectuer la séance de stimulation à un niveau optimal et efficace

PROGRAMMATION :

- Cefar Rehab X2 permet au thérapeute de créer et d'enregistrer trois programmes personnels.

CEFAR FLOW TENS :

- Un programme prédéfini comprenant une nouvelle méthode de stimulation confortable.
- Utilisez les deux canaux simultanément pour associer le soulagement de la douleur à une sensation agréable de massage.

CEFAR CLINICAL GUIDE (CCG™) :

- Des informations complètes à propos des indications les plus courantes se trouvent dans le guide de l'utilisateur.

COMMUTATEUR MANUEL :

- Le commutateur manuel permet le réglage manuel de la durée des contractions dans les programmes de stimulation intermittente, garantissant ainsi un traitement efficace et personnalisé.

AUTRES FONCTIONNALITÉS :

- Écran rétroéclairé
- Fonction pause
- Verrouillage de programme
- Minuterie réglable : de 0 à 60 min.
- Verrouillage du clavier
- Auto-contrôle
- Surveillance



CEFAR COMPLEX REHAB 2 VOIES

Référence : 10026

27 PROGRAMMES PRÉÉTABLIS

6 TENS

TENS CONVENTIONNEL :

- Stimulation à haute fréquence provoquant une sensation de fourmillement. Il s'agit souvent du premier choix de traitement en cas de douleur aiguë et de longue durée
- Fréquence 80Hz - 180µs

TENS BURST :

- Stimulation à basse fréquence produisant des contractions musculaires visibles. Le soulagement de la douleur est plus lent mais dure plus longtemps qu'avec le TENS conventionnel
- Fréquence 2Hz - 180µs

TENS DURÉE D'IMPULSION MODULÉE :

- Un type de stimulation à haute fréquence au cours duquel la largeur des impulsions varie en permanence. Cela peut entraîner une sensation d'ondulation, pouvant être plus agréable qu'en cas de durée d'impulsion constante.
- Fréquence 80Hz - 70µs/ 180µs

TENS FRÉQUENCES MIXTES :

- Une association de stimulations à haute fréquence et à basse fréquence, pouvant constituer un traitement de soulagement de la douleur plus efficace.
- Fréquence 80Hz / 2Hz - 180µs

TENS FLOW :

- Une stimulation en alternance entraînant un effet de massage et de pompage qui peut être utilisée pour soulager la douleur et améliorer la circulation dans la zone stimulée. Utilisez toujours deux canaux et quatre électrodes
- Fréquence 80Hz - 70µs/ 180µs

GUIDE POUR DES INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES :

- Un programme utilisé pour augmenter la précision des injections intramusculaires de botox (toxine botulique). Ces injections sont utilisées dans le traitement de la spasticité, la dystonie, l'hémispasme facial et le bruxisme.
- Fréquence 1Hz - 50µs

CEFAR COMPLEX REHAB 2 VOIES

Référence : 10026

27 PROGRAMMES PRÉÉTABLIS

21 NMES

ÉCHAUFFEMENTS :

- Échauffement court
- Échauffement long

STIMULATION INTERMITTENTE :

- Groupes musculaires les plus petits 1
- Groupes musculaires les plus petits 2
- Groupes musculaires les plus petits 3
- Groupes musculaires les plus petits 4
- Groupes musculaires les plus grands 1
- Groupes musculaires les plus grands 2
- Groupes musculaires les plus grands 3
- Groupes musculaires les plus grands 4

STIMULATION EN ALTERNANCE :

- Groupes musculaires les plus petits
- Groupes musculaires les plus grands

STIMULATION AVEC REPOS ACTIF :

- Groupes musculaires les plus petits
- Groupes musculaires les plus grands

RENFORCEMENT :

- Membres supérieurs
- Membres inférieurs
- Dos et tronc

RÉCUPÉRATION :

- Groupes musculaires les plus petits
- Groupes musculaires les plus grands

MASSAGE :

- Groupes musculaires les plus petits
- Groupes musculaires les plus grands